

NIPLUX


BEGUN

ニップラックス
ピガン

保管用

保証書付

取扱説明書

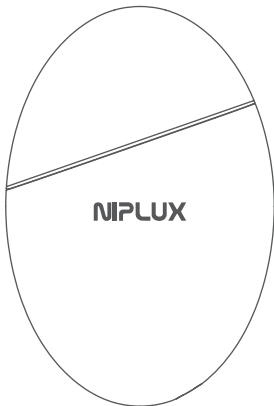

操作方法動画



公式サイト

NIPLUXシリーズについての
お問い合わせは公式サイトへ www.niplux.jp

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

目次

安全上のご注意	04
各部の名称とはたらき	10
充電方法	12
ご使用前の注意事項	14
使用方法	15
お手入れ方法	18
保管方法	19
商品仕様	20
故障かなと思ったら	21
無償保証規定	23



安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。



故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

 危険	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。
 必ず守る	実行しなければならない内容。



危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している方は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器



警告



禁止

他の機器と同時に使用しない。

ケガや体調不良の原因になります。

乳幼児や子ども、自分で意思表示できない方に使用させない。

ペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

次のような場合や部位には使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

- 皮膚炎、やけど、傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患、過度の日焼けなどお肌に異常がある場合及びその部位
- 胸部、陰部、腹部、ひじ・ひざ・背骨などの骨部、耳、眼球や目の周り、のどなど首の前方、関節部位、結石のある部位
- 金属、シリコンなどを埋め込んである部位
- 飲酒後や疲労の激しい場合
- 睡眠中
- 運転中



警告



禁止

視覚障害のある方は1人で使用しない。

ケガや体調不良の原因になります。

首の周辺に使用するときには特に注意し、のどなど首の前方には使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

事故やケガ、故障の原因になります。



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

●悪性腫瘍のある方 ●心臓疾患、障害及びその疑いのある方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●疾患により発熱している方 ●骨折、捻挫、肉離れ、むち打ち症、頸椎損傷などの急性疾患（疼痛性）のある方 ●骨粗しょう症、椎間板ヘルニア、痛風の方 ●背骨に異常のある方 ●血圧に異常のある方、血液疾患や血栓のある方及びその疑いのある方 ●紫斑になりやすい方 ●安静を必要とする方 ●妊娠中、出産直後の方 ●薬を服用中の方 ●通院中の方 ●体調が優れない方 ●四肢の不自由な方 ●かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方 ●体力が極端に衰えた方 ●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ●神経障害、皮膚知覚障害の方 ●アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方 ●シリコーン製品や金属製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。

医師に相談のうえ指示に従ってください。



警告



必ず守る

本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。充電中の場合は充電コードを抜く。

破損や発火、事故やケガの原因になります。

●異音●異臭●異常発熱●けむりが出るなど

交流100V~240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。

火災や感電、故障の原因になります。

充電コードは付属品を使用する。

出力が高い充電コードを使用すると、故障や事故の原因になります。



禁止

充電コードは

●先端部分を持ち、コードを引っ張らない。●濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させたりしない。●収納時に本体などに巻きつけない。●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。●重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。●傷んでいるとき、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で保管、使用しない。加熱したり、火中に投下したりしない。

事故や部品の変形、故障の原因になります。



警告



水場禁止

充電コードや本体の差込口、隙間などにピン、異物、ゴミ、水分を付着させない。

感電やショート、発火の原因になります。

本体および充電コードを水で濡らさない。浴室など湿気の多い場所や屋外で使用、保管しない。また、濡れた身体に使用しない。

感電、ショート、発火、故障、ケガの原因になります。



禁止

不安定な場所で保管しない。また、本体や付属品を落としたりぶつけたりしない。

ケガや本体が破損、故障する原因になります。

強く押しつけて使用しない。

事故やケガ、皮膚や筋肉を傷める原因になります。

本製品の専用アタッチメント以外は使用しない。

事故やケガの原因になります。

肌の弱い方は素肌で使用しない。

体調不良の原因になります。



必ず守る

子どもの手の届かない場所に保管する。

事故やケガの原因になります。

子どもが製品で遊ばないようにご注意ください。

本製品を使用するときはアクセサリ類を外す。

事故やケガの原因になります。

本体や付属品に破損がないことを定期的に確認する。

事故や故障の原因になります。



警告

使用しないときやお手入れするときは必ず電源を切る。

感電や故障の原因になります。

使用中、髪や指などが巻き込まれないようにする。

事故やケガの原因になります。頭皮に使用するときは髪をかき分けて頭皮にやさしく当て、すべらせずに「押し離す」を繰り返すようにご使用ください。

初めて使用するときや慣れるまでは、必ず振動レベル1及び短時間から使用する。

強い刺激に慣れていないとケガの原因になります。

顔周りや頭皮にはレベル1または2で使用する。また、頭皮には1本型または3本型アタッチメントを取り付けた状態で使用する。

ケガや体調不良の原因になります。

1回の使用時間は15分以内を目安とする。また、同一箇所への連続使用は3分以内を目安とする。

筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、ケガを招くことがあります。複数の方が連続で使用する場合、本体が熱くなり故障の原因となる可能性があります。1回の使用時間は15分以内とし、休ませながら順にご使用ください。

本体は必ず手に持って使用する。

本体の上に乗ったり座ったりして使用しないでください。転倒による事故やケガ、故障の原因になります。

分解や修理、改造をしない。

火災や感電、ケガ、故障の原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。




必ず守る




分解禁止

各部の名称とはたらき


本体

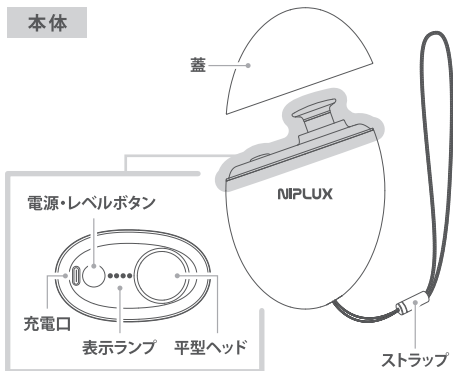

付属品

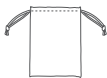


アタッチメント用収納袋

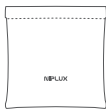

ポーチ



USB充電コード
(type-c)

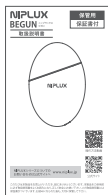

取扱説明書兼保証書

各部の名称とはたらき


付属品



**ドーム型
アタッチメント**




腕や足など
あらゆる部位を
面で刺激

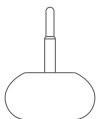

**1本型
アタッチメント**



ピンポイントで
やさしく刺激

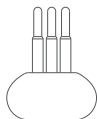


**3本型
アタッチメント**



1本型よりも
力強く
効率的に刺激

※平型ヘッドに取り付けて
使用してください。

アタッチメントをつけない状態
でもご使用いただけますが、
頭皮には使用しないでください。

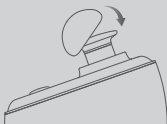

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

充電方法




初めてご使用されるときや充電残量が減ったときは、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。



充電残量が減ると、4つの表示ランプが同時に点滅します。

1 | 付属の充電コードのtype-Cコネクタを本体の充電口に接続する

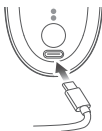


※出力が10Wより大きい充電コードを使用すると故障の原因になります。

※電池寿命を長持ちさせるため、15～35℃の湿気の少ない環境での充電を推奨します。

2 | 充電コードのUSB端子をACアダプターに接続し、壁面コンセントに差し込む

※出力5V2A以下のACアダプターから充電してください。

(5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。)

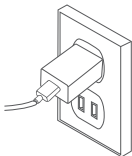


※ACアダプターは付属しておりません。

充電方法

3 | 表示ランプが4つ全て点灯に変わると充電完了

※充電中、表示ランプが1から順に点灯します。

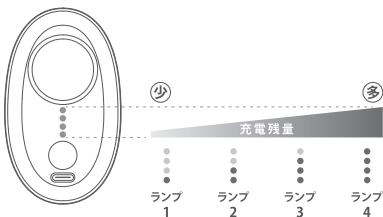

4 | 充電完了後、充電コードを本体とACアダプターから取り外す

■ 充電時間の目安


充電時間	動作時間
約2時間	約4時間

※使用環境や充電環境、使用するレベルによって充電時間や動作時間は大きく異なります。

■ 充電電池について

- 充電コードを差したままでは使用できません。充電中に電源を入れようとしないでください。
- 充電電池は消耗品です(保証対象外)。
- 電池寿命は使用、保管などの状態により大きく変化します。

ご使用前の注意事項

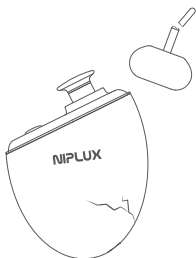

破損・傷
がないか確認


- ご使用前に本体やアタッチメントに破損や傷がないか確認してください。
破損や傷がある場合は、お肌を傷つける恐れがあるため使用しないでください。
- ご使用前に電源・レベルボタンやランプの点灯が正常に動作するかご確認ください。
- しばらく使用しなかった場合、再度説明書をよく読み、機械が正常かつ安全に動作することをご確認ください。
- ご使用前にアクセサリ類は外してください。
- お肌に異常がないかよく確認してからご使用ください。
また、無理に強く押しつけて使用しないでください。
- 使用后、刺激により一時的にお肌が赤くなる場合があります。
通常は時間経過により治まりますが、症状が回復しない場合は専門医にご相談ください。

使用方法

- 1 | 電源がオフになっていることを確認して、アタッチメントを平型ヘッドに取り付ける

※ヘッドに被せるように取り付け、外れないことを確認してください。


※頭皮に使用する場合は、必ず1本型または3本型アタッチメントを取り付けてください。

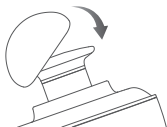

- 2 | ストラップに手を通して本体をしっかり持ち、電源・レベルボタンを長押しして電源をオンにする

電源がオンになると表示ランプが点灯し、レベル1で動作を開始します。

電源を入れてから、約15分後に自動停止します。
途中で電源を切る場合は、電源・レベルボタンを長押ししてください。

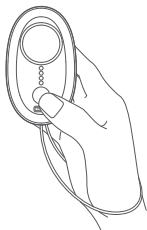


使用方法

3 | 電源・レベルボタンを短押しして振動レベルを選ぶ

レベル1～4からお選びください。

※顔や頭皮に使用する場合はレベル1～2
でご使用ください。

※初めてご使用される方はレベル1および
短い時間からお試しいただき、慣れたら
お好みに合わせてレベルを調整してく
ださい。

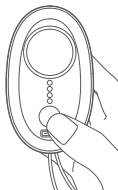

振動レベル	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4
表示ランプ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
1分間あたりの 振動数の目安	約1600回	約2000回	約2250回	約2500回

4 | 肌に対して垂直に、軽く当てて使用する



肌に過度な力で押し当てて使用すると、安全のため自動的に動作が停止します。停止後、30秒以内に電源・レベルボタンを短押しすると、動作が再開されます。30秒以内に操作が行われなかった場合は、自動的に電源がオフになります。

使用方法

※無理に強く押しつけて使用しないでください。

ケガや故障の原因になります。

※1回の使用時間は15分以内を目安としてください。

また、同一箇所への使用時間は3分以内を目安とし、連続使用はお控えください。

※「安全上のご注意」をよく読み、使用できない部位をご確認のうえ正しくご使用ください。

フェイスケア



頭皮ケア




1本型・3本型アタッチメントのみ使用可能

首・肩ケア



ボディケア

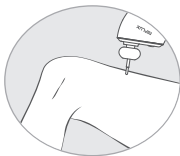

※のどなど首の前方には使用しないでください。

※頭皮に使用する場合は、必ず1本型または3本型アタッチメントを取り付けてください。ドーム型アタッチメントや平型ヘッドでの使用はケガの原因になります。

※頭皮・顔全体への使用時間は合計で3分以内を目安としてください。

※髪や頭皮が濡れた状態で使用しないでください。

※頭皮に使用するときには髪をかき分けて頭皮にやさしく当て、すべらせずに「押して離す」を繰り返すようにご使用ください。

お手入れ方法

- 本体および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体およびアタッチメントの汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よくしぼってから本体表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。
(平型ヘッド接続部付近にオイルがにじみ出ることがありますが、機器内の潤滑油によるもので、本体の異常ではございません。乾いた布などで拭き取ってお手入れをしてください。)
- アタッチメントは水洗い可能ですが、必ずピンを下に向け、弱い水流でやさしく洗い流してください。
水洗い後は、風通しの良い日陰で完全に乾かしてください。
なお、洗剤や熱湯(70°C以上)は使用できません。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
故障や部品の割れ、変色などの原因になります。




本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。
充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 水洗いしたアタッチメントは完全に乾いてから収納袋に入れて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。
また1か月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。
長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体およびアタッチメントのお手入れをしてから、付属の収納袋・ポーチに入れて保管してください。

本体蓋の裏側に
ドーム型アタッチメントを収納できます。アタッチメント用収納袋に入れられます。

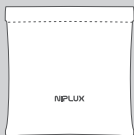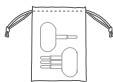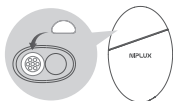

本体とアタッチメントを
ポーチにまとめて持ち運べます。

商品仕様

ブランド	NIPLUX
品名	BEGUN(ビガン)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約8.6W(充電時)
セット内容	本体×1 / ドーム型アタッチメント×1 / 1本型アタッチメント×1 / 3本型アタッチメント×1 / ポーチ×1 / アタッチメント用収納袋×1 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1
電池容量	600mAh
本体寸法	約110×73.8×45mm
化粧箱寸法	約159.4×159.4×62.9mm
重量	本体:約226g(ストラップは除く)
使用環境	環境温度 0~40℃ / 相対湿度 30~80%RH
製品素材	ABS、ステンレス鋼(SUS304)、シリコン、ナイロン
生産国	中国

故障かなと思ったら

Q	A
充電できない	<p>出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは出力が5V2A以内のものを使用してください。</p>
	<p>充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他の充電コードやACアダプターで充電をお試しください。</p>
	<p>充電口に付着物がないか確認してください。</p>
	<p>C to Cや出力の高い充電コードでは充電できない場合があります。 必ず指定の充電コードをご使用ください。 また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、ACアダプターでの充電をお試しください。</p>
動作しない	<p>充電中は使用できません。充電コードを抜いてから電源・レベルボタンを長押しして動作を開始してください。</p>

故障かなと思ったら

Q	A
肌に当てると止まる	充電が不足している可能性があります。充電を満タンにして再度お試しください。
	肌に過度な力で押し当てて使用すると、安全のため自動的に動作が停止します。やさしく当ててご使用ください。
使用中熱くなる	1回の使用目安は15分です。1時間以上連続使用した場合、または電源のオン/オフを短時間で繰り返した場合は本体が熱をもち故障の原因になります。30分ほど休ませてからご使用を再開してください。
	使用中は本体が多少熱くなる場合があります。熱さに異常を感じる場合は、使用せずに、購入先へご連絡ください。
勝手に電源が切れる	起動してから約15分経過するとタイマー機能が働き、自動的に電源がオフになります。故障ではありません。