


# NIPLUX

## NECK PREMS

### 取扱説明書

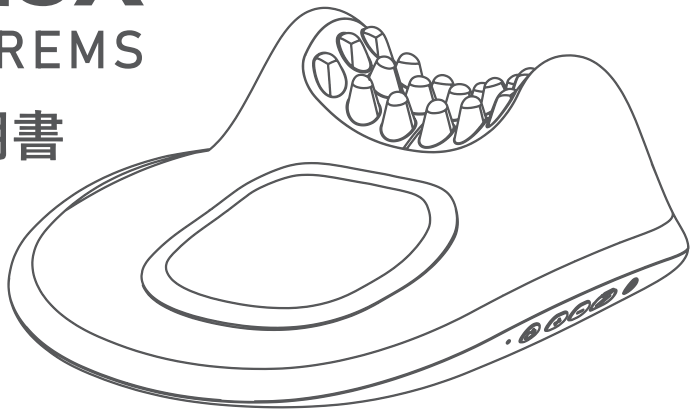

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく  
安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。  
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

[www.niplux.jp](http://www.niplux.jp)



公式サイト



操作方法動画

# 目次

ご使用の前に	03
安全上のご注意	04
各部の名称とはたらき	09
充電方法	11
使用方法	12
モード別オシログラム	18
お手入れ・保管方法	19
商品仕様	20
故障かなと思ったら	21

# ご使用前に必ずご確認ください

商品には万全を期しておりますが、万一セット内容に不足がございましたら、当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

## セット内容

- 本体 (ニップラックスネックプレミス) .....1台
- リモコン .....1台
- USB充電コード (Type-c) .....1本
- 取扱説明書兼保証書 .....1部

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。



※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

# 安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

## ■危害・損害の程度を示す図記号

 <b>危険</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

## ■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。	 必ず守る	実行しなければならない内容。
---	--------------	---	----------------

# 危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している方は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

# 警告



禁止

視覚障害のある方は1人で使用しない。

ケガや体調不良の原因になります。

他の低周波/高周波医療機器と同時に使用しない。

事故やケガの原因になります。

乳幼児や子供、自分で意思表示できない方の手の届く場所に保管したり、使用させたりしない。

ペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

例：血栓〔そく(塞)栓〕症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

次のようなときは使用しない。

- 疲労が激しい時
  - 飲酒後
  - 食前、食後の1時間
  - 睡眠中
  - 皮膚に異常のある時
  - 運転中
- 事故やケガ、体調不良の原因になります。

# 警告

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

●悪性腫瘍のある方 ●心臓疾患、急性疾患、感染症疾患のある方 ●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方 ●薬を服用中の方 ●妊娠中、生理中、出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●肌に傷や湿疹、はれもの、過度の日焼けなど異常のある方 ●体調が優れない方 ●発熱している方 ●骨折、骨粗しょう症、ねんざ、肉離れ、むち打ち症、頸椎損傷、椎間板ヘルニア、痛風などの急性疾患（疼痛性）のある方 ●医療機関で治療中の方 ●かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方 ●体力が極端に衰えた方 ●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ●神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方 ●脳神経に異常がある方（てんかんなど） ●刺青（タトゥー）を入れている部位に使用する方

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。

医師に相談のうえ指示に従ってください。

本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。

充電中の場合は充電コードを抜く。

破損や発火、事故やケガの原因になります。 ●異音 ●異臭 ●異常発熱 ●けむりが出るなど

交流100V～240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。

火災や感電、故障の原因になります。

使用しない時は必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。

EMS通電部に破損がないか定期的に確認をする。

事故や故障の原因になります。

充電コードは付属品を使用する。

出力が10Wより大きい充電コードを使用すると故障や事故の原因になります。



必ず守る

# 警告

- 充電コードは
- 先端部分を持ち、コードを引っ張らない。
  - 濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させたりしない。
  - 収納時に本体などに巻きつけない。
  - 破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
  - 重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
  - 傷んでいるとき、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。

充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。  
事故やケガ、故障の原因になります。

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。  
ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。  
電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で保管、使用しない。  
加熱したり、火中に投下したりしない。  
事故や部品の変形、故障の原因になります。




取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。  
本製品は首用です。事故やケガ、故障の原因になります。

不安定な場所で保管しない。本体や付属品に重いものを置いたり、落としたりぶつかけたりしない。  
ケガや本体が破損、故障する原因になります。




禁止

# 警告

 禁止	<p>本体および充電コードを水で濡らさない。浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。 濡れた身体に使用しない。 火災や感電、ケガの原因になります。</p>
	<p>突起部分に故意に力を加えたり、むやみに体重をかけたりしない。 ケガや故障の原因になります。</p>
	<p>布団の中や、毛布などをかぶせて使用しない。 本体内部が高温になる場合があります。</p>
 分解禁止	<p>分解や修理、改造をしない。 火災や感電、ケガや故障の原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p>
 必ず守る	<p>本体を装着する前、あるいは肌から離す前に必ず電源をオフにする。 通電中に本体を動かすと、ショックを受ける恐れがあります。</p>
	<p>平らな場所において使用する。 立った状態や無理な体勢での使用は、故障やケガの原因になります。</p>
	<p>本製品を使用するときは、アクセサリ類を外す。 事故やケガの原因になります。</p>
	<p>お手入れする際は必ず電源を切る。 感電や故障の原因になります。</p>
	<p>初めて使用するときや慣れるまでは、短時間及び、EMSレベル1、加熱弱めから使用する。 強い刺激になれていないとケガの原因になります。</p>
<p>1回の使用時間は15分以内とする。また、同一箇所への連続使用は避ける。 長時間の連続使用は必要以上の刺激となりケガの原因になります。</p>	

# 各部の名称とはたらき

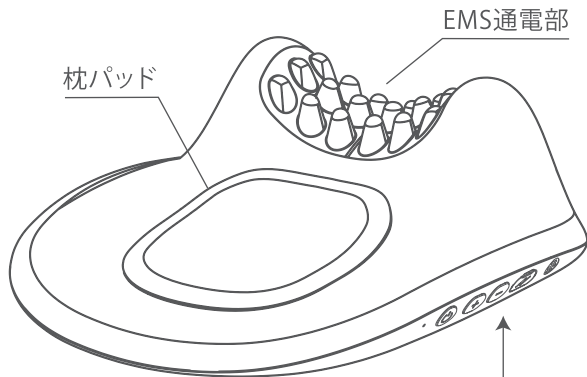


本体

- ① ランプ
- ② 電源ボタン
- ③ +ボタン
- ④ -ボタン
- ⑤ 充電口
- ⑥ スピーカー

# 各部の名称とはたらき

## リモコン

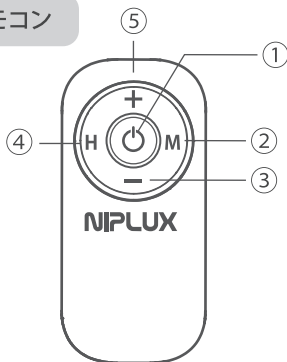

- ① 電源ボタン
- ② Mボタン(モードボタン)
- ③ -ボタン
- ④ Hボタン(加熱ボタン)
- ⑤ +ボタン


### ⑥ 電池絶縁シート

※ご使用前にこのシートを引き抜いてください。


### ⑦ 電池カバー

### ⑧ リチウム電池(CR2032)


※電池を水で濡らしたり、濡れた手で触らないでください。  
液漏れした時は、直ちに使用を中止してください。

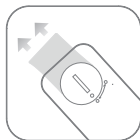

⑥

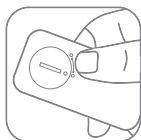

⑦

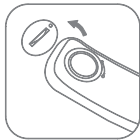


⑧

# 充電方法

- 初めてご使用になる時や、「バッテリー残量が少なくなっています」という音声流れ、ランプが点滅した場合は、本体の電源をオフにしてから充電してください。
- 充電をするとランプが**橙色**に点灯します。その間、製品は使用できません。
- 充電が終わるとランプが**緑色**に点灯します。
- 充電する際は、**DC5V2A以内**のACアダプターを使用してください。
- 2～3時間の充電で約60分使用可能です。
- ACアダプターは付属していません。

シリコンキャップを外し、USB-typeCの端子を繋げて充電してください。

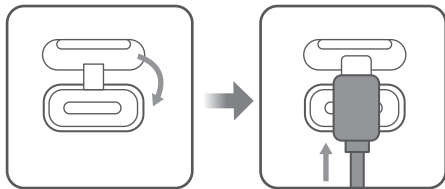

※ 使用するレベル・モード、充電環境によって充電時間や動作時間は大きく異なります。

※ 初めての充電や長時間不使用の場合、充電後の電池持続時間が短い場合があります。何度か使用すると正常に戻ります。

## ■ご使用の前に






EMSの感じ方は個人差があります。万が一、強い痛みを感じたり、気分が悪くなったりした場合は直ちに使用を中止してください。

# 使用方法

## ボタン操作一覧

### ■本体

	長押し	短押し
	電源オン/オフ	モード切替
	加熱レベル切替	EMSレベル+
	音声オン/オフ	EMSレベルー

### ■デフォルト設定

EMS	レベル1
モード	オート
加熱	加熱弱め

### ■リモコン

	長押し	短押し
	電源オン/オフ	—
	—	EMSレベル+
	音声オン/オフ	EMSレベルー
	—	加熱レベル切替
	—	モード切替


# 使用方法

## 電源オン

### 1 | 本体の(⏻)ボタンを長押しで電源をオンにします。

※初めに使う際、または前回使用して2分以上経過している場合、本体から電源を入れてください。リモコンから電源オンにできません。

※前回電源をオフにして2分以内であればリモコンから電源オンができます。(長押し)

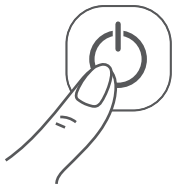

## 本体を装着

### 2 | 首に(直接肌に)装着します。

EMS電極部が肌にしっかりと当たるように装着してください。地肌が乾燥しているとEMSを感じにくい場合や、ピリつきを感じる場合がありますので、必ずお肌が保湿された状態でご使用ください。

※水やジェルで地肌を保湿するとよりEMSを感じやすくなります。

※水やジェルは本体に直接塗布しないでください。  
隙間に入ると故障の原因になります。


※オイルは通電しないので使用しないでください。

※お肌を感知していない場合は約5分後に自動停止します。



# 使用方法

## モード切替

- 3 | 本体の  ボタンもしくはリモコンの「M」ボタンを短押ししてモードを切り替えます。  
ボタンを短押したときにモードが右図の順番で切り替わります。

### ■本体



### ■リモコン



### オートモード

- モード1 ..... たたきモード
- モード2 ..... かっさモード
- モード3 ..... おしモード
- モード4 ..... つまみモード

モードを切り替えるたびに、EMSの強さはレベル1にリセットされます。再度お好みのEMSレベルを選択してください。

## EMS強さ選択

- 4 | +/− ボタンを短押しでEMSの強さを選択します。  
EMSのレベルは0から16まで選択可能です。初めてお使いになる場合は安全のため必ずレベル1からお試しください。

### ■本体



### ■リモコン



# 使用方法

## 加熱レベル選択

- 5 | 本体の「+」ボタンを長押し、  
もしくはリモコンの「H」ボタンを  
短押しして加熱レベルを切り替え  
ます。  
加熱オフ・加熱弱め・加熱強めから  
お選び下さい。

■温度について(使用環境によります)

モード	温度
加熱オフ	—
加熱弱め	38 ± 3℃
加熱強め	45 ± 3℃

※初めてご使用される場合や敏感肌の方は、必ず加熱弱めから使用して下さい。

■本体



■リモコン



# 使用方法

## 音声オン/オフ

6 | 「-」ボタンを長押しで音声のオン/オフが切り替わります。

※音声オフで終了した場合、次回起動時は音声オフで開始します。

■本体



■リモコン



## 電源オフ

7 | 電源ボタンを長押しで本体の電源をオフにします。

15分使用后、自動的に電源がオフになります。使用後は必ずお手入れをしてください。

■本体



■リモコン



# 使用方法

## 2WAY仕様

向きを変えて2つの使い方が可能です。

### ゆったりストレッチ

初めてお使いの方に。  
緩やかなカーブで、  
ゆったりとやさしくストレッチします。



### しっかりストレッチ

慣れてきた方に。  
方向を変えて強めのカーブで、  
しっかりストレッチします。



# モード別オシログラム

■オートモード〈5 - 300Hz〉



■モード1(たたきモード) 〈5 - 20Hz〉



■モード2(かっさモード) 〈60 - 100Hz〉



■モード3(おしモード) 〈50 - 80Hz〉



■モード4(つまみモード) 〈5 - 60Hz〉



# お手入れ・保管方法

## お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。  
汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

## 保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。  
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



LI-ion

## 商品仕様

ブランド	NIPLUX (ニップラックス)
品名	NECK PREMS (ネックプレミス)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約10W (充電時)
セット内容	本体×1/リモコン×1/USB充電コード×1/取扱説明書兼保証書×1
本体寸法	約267×261×105mm
化粧箱寸法	約302×287×125mm
重量	本体:約830g/リモコン:約20g
電池容量	2200mAh
使用環境	環境温度5℃-40℃/相対湿度≦80%RH
製品素材	本体:シリコン、ABS樹脂、PC、皮革 / リモコン:ABS樹脂、PC
生産国	中国

## 故障かなと思ったら

Q	A
充電ができない	出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。
	充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。
	充電口に付着物や破損がないか確認してください。
	C to Cや出力の高い充電コードでは充電できない場合があります。 必ず指定の充電コードで充電してください。 また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、ACアダプターでの充電をお試しください。
音声ガイダンスが鳴らない	「-」ボタンを長押しし、音声がおフになっていないか確認してください。その後起動音が流れるか確認してください。
EMSが感じられない	正しく電源が入っていること、衣服などが機器に当たっていないかご確認ください。素肌センサーが感知できない場合、約5分で電源がおフになります。

## 故障かなと思ったら

Q	A
運転中に停止した	EMS通電部がお肌を感知できない場合、約5分後に自動停止します。水やジェルでお肌をしっかりと保湿して密着度を上げてください。
	起動してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。
リモコンが反応しない	リモコンと本体が接続できていない可能性があります。下記手順に従って接続をお試ください。 ①本体の電源ボタンで電源を入れる ②本体の電源を切る ③本体の電源ボタンを5回連続で短押しする ④本体のランプが橙色点滅する ⑤リモコンの「+」ボタンを本体の近くで長押しする ⑥本体のランプが橙色点灯になると、接続完了
電源が入らない	充電中は使用できません。 充電コードを外して再度電源を入れてください。