

NIPLUX

NECK RELAX LOOP


ニップラックスネックリラックスループ

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについての
お問い合わせは公式サイトへ www.niplux.jp

保管用
保証書付

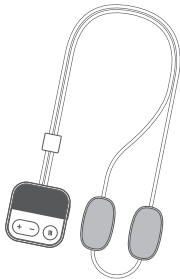

公式サイト



操作方法動画

目次



安全上のご注意	03
各部の名称とはたらき	10
充電方法	11
ご使用前の注意事項	13
使用方法	14
オシログラム	17
お手入れ方法	18
保管方法	19
商品仕様	20
故障かなと思ったら	21

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないで使用をお願いします。異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

 危険	 警告
取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。	 必ず守る	実行しなければならない内容。
--	--------------	---	----------------

危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している方は使用しない。
医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

他の低周波/高周波医療機器と同時に使用しない。
事故やケガの原因になります。

乳幼児やペットには使用しない。
事故やケガ、体調不良の原因になります。



必ず守る

子供や身体の不自由な方だけでの使用は避ける。
未成年者は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。また、子供の手の届かない場所に保管する。

事故やケガの原因になります。
子どもが製品で遊ばないようにご注意ください。



警告



必ず守る

次のような方及び場合には医師と相談して使用する。

事故や肌、身体のトラブルの原因になります。

下記にあてはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

●悪性腫瘍のある方 ●心臓疾患、障害及びその疑いのある方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●疾患により発熱している方 ●骨折、捻挫、肉離れなど急性[とう(疼)痛性]疾患の方 ●血圧に異常のある方、血液疾患や血栓のある方及びその疑いのある方 ●医師から運動を禁じられている方 ●安静を必要とする方 ●妊娠中の方、出産直後の方 ●薬を服用中の方 ●通院中の方 ●かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方 ●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ●導電性の金属などを埋め込んである部位に使用する方 ●インプラントを装着している方 ●神経障害、皮膚知覚障害のある方 ●接触性皮膚炎など皮膚に既往症のある方 ●アレルギー体質、敏感肌の方

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。

医師に相談のうえ指示に従ってください。

警告

次のような場合や部位には使用しない。

事故やケガ、肌・身体のトラブルの原因になります。

●皮膚炎、やけど、傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患などお肌に異常がある場合およびその部位 ●かゆみやほてりのある部位 ●膨らんだほくろ、ウイルス性のイボのある部位 ●胸部や背中の上部など心臓に近い部位、目の周り、口内、陰部、粘膜など ●当日脱毛処理をした部位 ●刺青(タトゥー)を入れている部位 ●飲酒後や疲労の激しい場合 ●運転中

取扱説明書に記載されている用途以外には本製品を使用しない。
ケガや本体が故障する原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

例) 血栓症、塞栓症、重度の動脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

充電コードは

●先端部分を持ち、コードを引っ張らない。●濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させたりしない。●収納時に本体などに巻きつけない。●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。●重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。●傷んでいるとき、差し込みがゆるいときは使用しない。
感電やショート、発火の原因になります。



禁止



警告

本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。充電中の場合は充電コードを抜く。●異音●異臭●異常発熱●けむりが出る など破損や発火、事故やケガの原因になります。

交流100V～240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。
火災、感電、故障の原因になります。

充電コードは付属品を使用する。
出力が高い充電コードを使用すると、故障や事故の原因になります。



使用しない時は必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。本体や付属品に破損がないことを定期的に確認する。
感電やショートによる火災などの原因になります。

転倒しやすい場所は避ける等、周囲の状況には十分注意して使用する。
万が一、ショックを受けた場合に、転倒によるケガの原因になります。



必ず守る

警告

 禁止	<p>定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。 電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。</p>
	<p>高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内)や埃のある場所で保管、使用しない。加熱したり、火中に投下したりしない。 事故や部品の変形、故障の原因になります。</p>
	<p>不安定な場所で保管しない。本体や付属品に重いものを置いたり、落としたりぶつけたりしない。 ケガや本体が破損、故障する原因になります。</p>
	<p>ループやパッド部分を強く引っ張ったり、無理に変形させたりしない。 破損による感電などの原因になります。</p>
	<p>ドライヤーやファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥させない。 部品の変形、故障の原因になります。</p>
 分解禁止	<p>分解や修理、改造はしない。 火災、感電、ケガの原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p>

警告



必ず守る

お手入れする際は必ず電源を切る。
感電や故障の原因になります。

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずEMSレベル1、温熱レベル1及び短時間から使用する。
事故やケガの原因となります。

1回の使用時間は15分以内とし、連続使用は避ける。
長時間の連続使用は必要以上の刺激となりケガの原因になります。

本体を肌に取り付ける前、あるいは肌から取り外す前に必ず電源をオフにする。
通電中に本体を動かすと、ショックを受ける恐れがあります。

本製品を使用するときは、金属、アクセサリ類を外す。
強いショックを受ける恐れがあります。





水場禁止

本体および充電コードを水で濡らさない。
浴室など湿気が多い場所や屋外で使用しない。
火災や感電、ケガの原因になります。

充電コードや充電口、隙間などに異物や水分を付着させない。
事故やケガ、故障の原因になります。

各部の名称とはたらき

本体

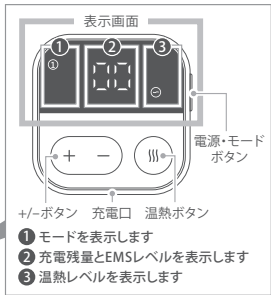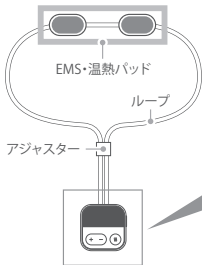

付属品



充電方法




初めてご使用されるときや充電残量が減ったときは、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

充電残量は起動時の3秒間、または[-]ボタンを長押しすると3秒間表示されます。充電残量が20%未満になると温熱機能が使用できなくなります。



- 1 | 本体、付属の充電コード、ACアダプターを下図のように接続する

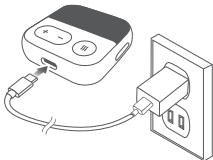

※5V2A以下のACアダプターから充電してください。


(5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。)

※ACアダプターは付属していません

充電方法

2 | 充電表示が100%になると充電完了

※充電中は本体の電源をオンにしないでください。

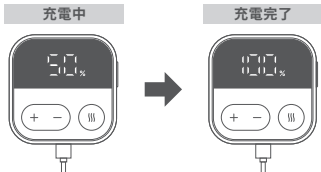

3 | 充電完了後、充電コードを本体とACアダプターから取り外す

● 充電時間の目安

充電時間	動作時間
約90分	約3時間

※使用環境や充電環境、使用するモード・レベルによって充電時間や動作時間は大きく異なります。

※温熱オフでEMSのみを使用する場合、より長く動作することができます。

ご使用前の注意事項



破損・傷がないか確認

- ご使用前にEMS・温熱パッドに破損や傷が無いか確認してください。破損や傷がある場合は、お肌を傷つける恐れがあるため使用しないでください。
- ご使用前に操作ボタンやランプの点灯が正常に動作するかご確認ください。
- しばらく使用しなかった場合、再度説明書をよく読み、機械が正常かつ安全に動作することをご確認ください。
- ご使用前にアクセサリなど金属類は外してください。
- お肌に異常がないかよく確認してからご使用ください。

! 注意
● NOTICE

EMSの感じ方は個人差があります。
万が一、強い痛みを感じたり、気分が悪くなったりした場合は直ちに使用を中止してください。

使用方法

1 | 装着しアジャスターで固定する


首の付け根や二の腕、ふくらはぎなどに装着し、アジャスターを適度に調整して固定してください。

※通電させるために必ず保湿された素肌に密着させてください。

※オイル系の保湿剤は通電を妨げるため、使用できません。

※注意事項をよく読み、使用できない部位をご確認ください。

※ループに対してパッドの位置は移動できません。無理に引っ張らないでください。

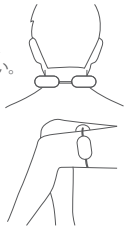

2 | 電源・モードボタンを長押しして電源をオンにする

電源がオンになると表示画面が点灯し、モード1・EMSレベル1・温熱オフで動作を開始します。

電源を入れてから、約15分後に自動停止します。途中で電源を切る場合は、電源ボタンを押してください。



使用方法




温熱オフ・EMSレベルを1～16に設定中にお肌が感知できない場合、レベル表示が点滅し約2分後に自動的に電源が切れます。お肌を軽く水で湿らせ、パッドをしっかりと密着させてから再度お試しください。

※EMSレベル0または温熱機能を使用する場合は、お肌を感知できない場合でも約15分間作動します。

3 | ㉓ ボタンを短押しして温熱レベルを選ぶ

温熱オフ、温熱レベル1～3からお選びください。初めてご使用される方はレベル1からお試しください。

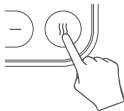

●温度目安

レベル1㉑	レベル2㉒	レベル3㉓
35±2℃	37±2℃	39±2℃

※ご使用環境によって温度が前後する場合があります。

※充電残量が20%未満になると、㉓ボタンを押しても「ピピ」と音が鳴り温熱機能が使用できなくなります。

使用方法

4 | 電源・モードボタンを短押しして モードを選ぶ

モード1～5からお選びください。
モードを切り替えるたびにEMSレベル
は1にリセットされます。



5 | [+/-]ボタンを短押ししてEMSレベルを選ぶ

レベル0～16からお選びください。
初めてご使用される方はレベル1から
お試しください、慣れたらお好みに合
わせてレベルを調整してください。



6 | 電源・モードボタンを長押しして電源をオフにする

使用中に停止する場合は、電源をオフに
してから身体から取り外してください。

※約15分使用后、自動的に電源がオフになり
ます。

※使用後は必ずお手入れをしてください。



オシログラム

モード1

[2-40Hz]



モード2

[8-12Hz]



モード3

[37-43Hz]



モード4

[30-35Hz]



モード5

[2-8Hz]



お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
ひどい汚れやパッドに付着した化粧水などは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



Li-ion

保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1か月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

商品仕様

ブランド	NIPLUX(ニップラックス)
品名	NECK RELAX LOOP(ネック リラックス ループ)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約2.5W(充電時)
セット内容	本体×1 / 収納ポーチ×1 / USB充電コード×1 取扱説明書兼保証書×1
電池容量	500mAh
本体寸法	約49×49×14mm(ループ部分を除く)
化粧箱寸法	約90×90×45mm
重量	本体:約57g
使用環境	環境温度 5~35℃ / 相対湿度 10~80%RH
製品素材	ABS、ステンレス、TPE
生産国	中国

故障かなと思ったら

Q	A
充電ができない	<p>出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは出力が5V2A以内のものを使用してください。</p>
	<p>充電コードまたはACアダプターの故障の可能性 があります。他の充電コードやACアダプター で充電をお試しください。</p>
	<p>充電口に付着物がないか確認してください。</p>
	<p>C to Cや出力の高い充電コードでは充電でき ない場合があります。必ず指定の充電コードを ご使用ください。また、一部のモバイルバッテ リーは使用できない場合がありますので、AC アダプターでの充電をお試しください。</p>

故障かなと思ったら

Q	A
電源が入らない	充電中は使用できません。 充電コードを外して再度電源を入れてください。
運転中に停止した	起動してから約15分経過すると、自動的に電源が切れます。故障ではありません。
	温熱オフ・EMSレベルを1～16に設定している状態でパッドがお肌を感知できない場合、約2分後に自動停止します。水やジェルでお肌を軽く湿らせてしっかり密着させてください。
ビリビリする EMSを感じない	お肌が乾燥しているとピリつきを感じやすくなります。水やジェルでしっかりと保湿してから使用してください。 (※オイルは通電しないため使用不可)